



5 Menu Patient

Lorsque le traitement est activé

Le patient peut ajuster les réglages Température circuit ou Humidificateur en utilisant le bouton rotatif de commande pour sélectionner et pour modifier.



- 1/ Pression du traitement
- 2/ Réglage température circuit réglable
- 3/ Réglage humidificateur réglable
- 4/ Fonctions activées

Écran pression du traitement




Fonction de rampe
Le patient peut activer la rampe en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil. L'écran Thérapie change pour afficher la pression de rampe, et le cercle bleu indique l'augmentation progressive de pression.


Écran pression de rampe. NB : il est recommandé de ne pas utiliser la fonction rampe avec les modes de ventilation (PPC uniquement).

Lorsque le traitement est désactivé

Dans l'écran d'accueil, vous êtes en mode patient, vous avez le choix entre les écrans suivants :

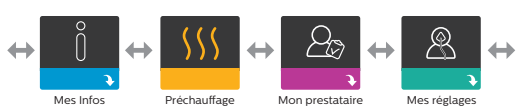

Mes infos :

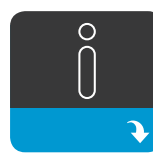


Le patient peut consulter les heures de thérapie, la pression 90%, l'IAH, la mise en place du masque et la respiration périodique (Cheyne-Stokes), si activés. Il ne peut pas modifier les réglages.

Préchauffage



Cet écran ne s'affiche que lorsqu'un humidificateur est raccordé. Cette fonction permet de préchauffer le réservoir d'eau pendant 30 minutes avant de démarrer le traitement. Sélectionner « MAR » (icône orange) ou « ARR » (icône grise) à l'aide du bouton rotatif.


Mon prestataire

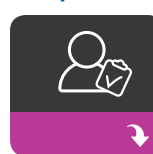

Le patient peut consulter les informations sur l'appareil et les rapports. Il ne peut pas modifier les réglages. C'est ici aussi qu'il peut passer un appel manuel sur l'écran « Envoyer/Recevoir » et faire un auto-diagnostic de l'appareil sur l'écran « Performances ».

Performance Check :
Accessible dans le menu Patient, icône "Mon Prestataire", il permet d'évaluer rapidement un appareil de traitement à distance. Le contrôle met l'appareil sous tension et recherche des erreurs de fonctionnement. L'écran indique ensuite si le test de la DreamStation a réussi (coche verte) ou si elle doit être renvoyée pour révision (X rouge).

Mes réglages

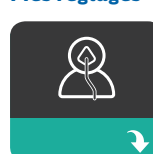


Le patient peut modifier certains réglages. Ces écrans ne s'affichent que s'ils sont disponibles et activés sur l'appareil. Une icône de verrouillage apparaît si ce réglage a été bloqué dans le menu clinique, le patient ne peut dans ce cas pas le modifier.

Ci-dessous les différents réglages sur lesquels le patient peut agir s'ils n'ont pas été verrouillés dans le menu clinique :

Icône	Description
	Réglage de la pression de début de rampe
	Vous pouvez modifier le réglage de la durée de rampe par incréments de 5 minutes. La plage est comprise entre 0 et 45 minutes.
	La pente correspond au délai nécessaire à l'appareil pour passer de la pression EPAP à IPAP. Si une pente est prescrite, vous pouvez ajuster son niveau dans une plage comprise entre 1 et 6 pour trouver le réglage qui convient le mieux. Un réglage de 1 correspond à la pente la plus rapide, tandis qu'un réglage de 6 correspond à la pente la plus lente.
FLEX	Réglage du niveau de confort Flex
	Choix du mode d'humidification, automatique si un circuit chauffant est branché
	Réglage de la résistance au masque (x1 pour tous les masques Philips hormis le Nuance Pro)
	Sélection du circuit en fonction de son diamètre
	Choix de la langue de l'interface
	Contrôle du masque avant le démarrage du traitement
	Éteindre ou allumer le modem, ne s'affiche que si un modem est installé
	Activer ou désactiver la fonctionnalité Bluetooth
	Réglage de l'heure (pour alignement des données de traitement, pas de fonction horloge)
	Cette fonction vous permet de régler la luminosité de l'écran. Le réglage par défaut est Auto. Vous pouvez modifier la luminosité dans une plage comprise 20 % et 100 %.

6 Humidification

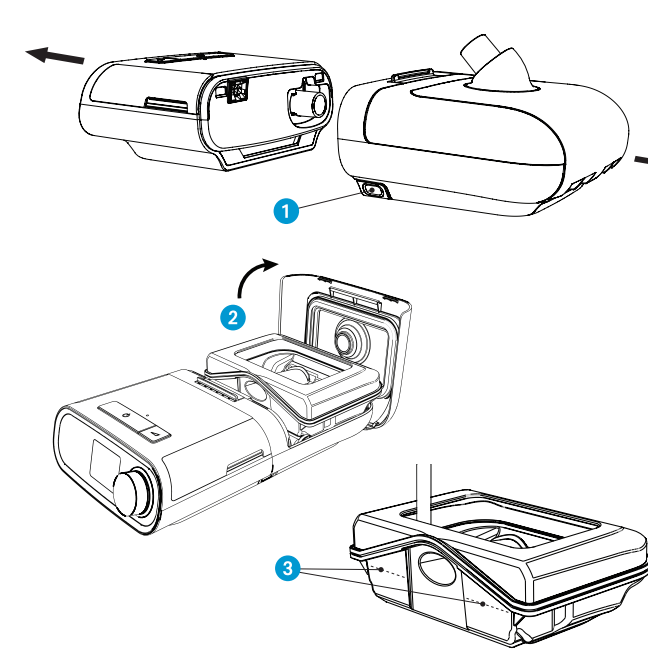

L'humidificateur s'enclenche à l'arrière de la DreamStation. Appuyer sur le bouton de retrait 1 et tirer pour le séparer. Faire glisser le loquet pour soulever puis ouvrir le couvercle de l'humidificateur 2. Retirer le réservoir et le remplir sans dépasser la ligne de remplissage maximum 3. Remettre le réservoir d'eau en place dans l'humidificateur et refermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Sélection du mode d'humidification

Dans les paramètres de confort, on peut choisir une humidification Fixe ou Adaptive (A). Si un circuit chauffant est raccordé à l'appareil, ce dernier passe automatiquement en mode Humidification circuit chauffant.

Le mode Fixe applique une chaleur constante à la plaque de l'élément chauffant de l'humidificateur. Dans certaines conditions et avec certains réglages, ce mode peut entraîner la formation de condensation dans le circuit. Le mode Adaptive adapte la température de la plaque de l'élément chauffant aux conditions ambiantes de la pièce, il est conçu pour ne pas entraîner la formation de condensation dans le circuit.

Température mode Fixe	Humidité mode Adaptive
Niveau 0 = éteint	Niveau 0 = éteint
Niveau 1 = 47° +/-3,5°	Niveau 1 = 55%
Niveau 2 = 51° +/-3,5°	Niveau 2 = 65%
Niveau 3 = 55° +/-3,5°	Niveau 3 = 75%
Niveau 4 = 60° +/-3,5°	Niveau 4 = 82%
Niveau 5 = 65° +/-3,5°	Niveau 5 = 95%


Mise en place du circuit chauffant

Auto-détection de l'ajout du circuit chauffant. La température du circuit et l'humidité relative peuvent être ajustées dans le menu patient lorsque le traitement est activé ou dans les paramètres de confort du menu clinique.

Humidité :	Température :
Niveau 0 = éteint	Niveau 0 = éteint
Niveau 1 = 70%	Niveau 1 = +2° versus T° ambiante
Niveau 2 = 74%	Niveau 2 = +4° versus T° ambiante
Niveau 3 = 77%	Niveau 3 = +5,5° versus T° ambiante
Niveau 4 = 81%	Niveau 4 = +7° versus T° ambiante
Niveau 5 = 85%	Niveau 5 = +9° versus T° ambiante

7 Conseils pratiques


Contrôle du masque

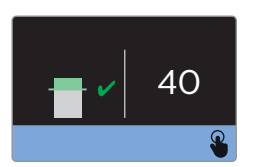

Écran contrôle du masque


Accessible dans ses réglages Patient, cette fonctionnalité lui permet de contrôler que son masque est bien adapté avant de commencer le traitement. L'appareil mesure la quantité de fuites, il délivre une pression de test pendant que l'écran décompte 40 secondes. Une barre verte signifie que l'ajustement est correct, une barre rouge signifie qu'une amélioration est nécessaire. Après le test, le traitement normal commence et l'écran affiche une coche verte ou un « X » rouge. La coche verte indique que la fuite détectée permet d'obtenir des performances optimales de l'appareil. Le « X » rouge indique que la fuite peut affecter les performances de l'appareil. Il reste toutefois opérationnel et peut délivrer le traitement.

Suivi du sommeil

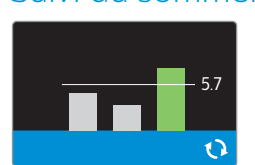

Écran résumé sur 3 nuits

L'appareil fournit des informations récapitulatives sur le traitement chaque fois qu'il est arrêté. L'écran affiche un « Résumé sur 3 nuits ». Il affiche l'utilisation nocturne des 3 dernières sessions de sommeil (mesurées par périodes de 24 heures, se terminant chaque jour à midi). La dernière session s'affiche dans la barre à droite et indique le nombre d'heures de sommeil. Une barre verte indique que le patient a dormi plus de 4 heures et une barre jaune indique moins de 4 heures d'utilisation. Les barres grises correspondent aux 2 nuits précédentes et permettent au patient de voir son évolution.

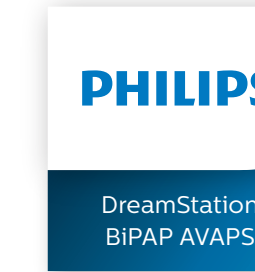

Guide de réglages

- 1 Présentation rapide
- 2 Début du traitement
- 3 Menu Clinique
- 4 Propositions de réglages initiaux
- 5 Menu Patient
- 6 Humidification
- 7 Conseils pratiques

